



## Máscara Anestésica em Silicone Tipo B

### MANUAL DE INSTRUÇÕES MÁSCARA ANESTÉSICA EM SILICONE TIPO B





## Máscara Anestésica em Silicone Tipo B

### INSTRUÇÕES DE USO

#### Máscara Anestésica em Silicone Tipo B

As máscaras de anestésicas em silicone tipo B, estão disponíveis nos seguintes tamanhos:

- CP 610003 - Máscara anestésica em silicone tipo B Nº 3 – Adulto (S);
- CP 610004 - Máscara anestésica em silicone tipo B Nº 4 – Adulto (M);
- CP 610005 - Máscara anestésica em silicone tipo B Nº 5 – Adulto (G).

### USO PRETENDIDO

A Máscara de anestésica em silicone tipo B, é indicada para uso em ventilação não invasiva em pacientes adulto. Tendo como finalidade ser utilizada em primeiros socorros, em salas de emergência, unidade de terapia intensiva e ambulâncias.

### ESPECIFICAÇÕES

Código	CP 610003	CP 610004	CP 610005
Tamanhos	#3	#4	#5
Material	Silicone	Silicone	Silicone
Coxim	PCB	PCB	PCB
Comprimento	110 mm	125 mm	135 mm
Altura	63 mm	72 mm	77 mm
Base	83 mm	91 mm	96 mm
Conexão de entrada	22 mmID	22 mmID	22 mmID
Peso	43,7 g	58,5 g	73,2 g

### MODO DE USO DO PRODUTO

Calçar luvas de proteção para evitar contaminação durante a limpeza das vias aéreas do paciente. Para à abertura das vias aéreas puxe o queixo para cima. Inspeção a boca do paciente quanto a existência de matéria estranha, caso haja limpe a boca do paciente. Posicione a máscara sobre a boca e nariz do paciente e segure firmemente.

Comece a oxigenação, através do reanimador manual ou ventilação mecânica.

Siga o protocolo de reanimação da instituição.

### LIMPEZA E DESINFECÇÃO

Para a Máscara de anestésica em silicone tipo B, deve ser realizada o processo de limpeza e desinfecção.

Utilize as instruções dos fornecedores de agentes de limpeza, bem como dos fabricantes dos equipamentos de desinfecção, devem ser seguidas as condições de aplicação.

Lave bem a máscara com água e detergente neutro, enxague removendo todos os resíduos de sabão.

A esterilização utilizando-se o gás de Óxido de Etileno deve obedecer aos parâmetros de temperatura a 54°C (130°F);

A desinfecção química por imersão pode ser realizada utilizando-se solução de Glutaraldeído 2% (Cidex) por 12 horas. Enxágue com água destilada e esterilizada, para eliminar as altas concentrações das substâncias químicas utilizadas, deixando secar em ambiente limpo.

**ATENÇÃO:** Após a esterilização em Óxido de Etileno, aguarde de 24 a 48 horas antes de utilizar o material, para permitir a aeração e saída dos resíduos de gás.



## Máscara Anestésica em Silicone Tipo B

Ao utilizar óxido de etileno, siga as instruções fornecidas pelo fabricante do equipamento de esterilização, para determinar as temperaturas e os períodos de aeração indicados.

### CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

Armazenar em local limpo e seco, longe do calor e da luz.

Temperatura de operação: 18°C a 40°C.

Umidade relativa do ar: < 85%.

### CONDIÇÕES DE TRANSPORTE

A máscara de anestésica em silicone tipo B, deve ser transportada em embalagem original e nas condições de temperatura entre 5°C e 40°C e umidade relativa inferior a 95%.

### CONDIÇÕES DE MANIPULAÇÃO

A máscara de anestésica em silicone tipo B, deve ser manuseada por profissional qualificado.

Deve ser armazenada em local limpo e seco.

A temperatura de armazenamento deve estar entre 5°C a 40°C, com umidade inferior a 95%.

Deve ser transportada em embalagem original.

Manutenção do produto, não requer manutenção preventiva ou corretiva.

O usuário deve seguir as orientações contidas neste manual de instrução para os cuidados com limpeza, esterilização e desinfecção para garantir a integridade do produto.

Em caso de dúvidas, mau funcionamento do produto, esclarecimentos, descarte, entre em contato com o importador Cirúrgica São Felipe Produtos Para Saúde.

### ADVERTÊNCIAS

Antes da primeira utilização e após a utilização em cada paciente, lave bem a máscara com detergente neutro e esterilize.

Não utilize óleo, graxa ou qualquer substância baseada em hidrocarbonetos em nenhuma parte da máscara.

Leia com atenção o Manual de Instrução, para utilizar corretamente as máscaras.

### PRECAUÇÕES

Produto de uso hospitalar, ao detectar qualquer falha no uso do produto, troque-o por outro. Descarte em local apropriado.

ANVISA Nº80901110004

#### Detentor Notificação Anvisa:

Cirurgica São Felipe Produtos Para Saúde Ltda

Rua Graça Aranha, 875 – Vargem Grande – CEP: 83.321-020

Pinhais – PR

CNPJ: 07.626.776/0001-60

AFE: 8.09.011-1 Tel: 41 3354-1001 / 41 3354-1002

Resp. Técnica: Liliam Cristina Aguilar Gomes COREN/PR 358.465

E-mail: [sac@cirurgicasaofelipe.com.br](mailto:sac@cirurgicasaofelipe.com.br)

[www.cirurgicasaofelipe.com.br](http://www.cirurgicasaofelipe.com.br)



## Máscara Anestésica em Silicone Tipo B

**Fabricante:**

XIAMEN COMPOWER MEDICAL TECH. CO., LTD  
Unit 301 No. 16, Xianghong Road, Xiang`an Torch Industrial Zone,  
Xiamen, República Popular da China.  
País de Origem: China.