



Máscara De Oxigênio Simples

MANUAL DE INSTRUÇÕES MÁSCARA DE OXIGÊNIO SIMPLES





Máscara De Oxigênio Simples

INDICAÇÃO DE USO E FINALIDADE

A Máscara de oxigênio simples foi projetada para oferecer ao paciente oxigenoterapia usando uma mistura de ar ambiente e oxigênio. Indicada para administrar oxigênio e administração de gases.

PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO

Conecte o tubo à rede de oxigênio levando o ar até o paciente através da máscara.

PREPARAÇÃO PARA USO

Inspeccione a máscara para verificar se está em perfeitas condições de uso. Posicione a máscara sobre a boca e nariz do paciente e conecte a rede de oxigênio com fluxo conforme prescrição médica.

COMPOSIÇÃO DA MÁSCARA:

Máscara: PVC
Tira em Elástico: 70% poliéster, 30% Viscose
Clipe de Metal: Alumínio
Tubo de Suprimento O₂: PVC
Conector: PP

DIMENSÕES:

Código	CP 331101	CP 331103
Tamanhos	Adulto	Pediátrica
Material	PVC	PVC
Base	102,5 mm	72 mm
Comprimento	135 mm	95 mm
Altura	79 mm	59 mm
Elástico	45 cm x 0,6 cm Elastano 75 % Poliéster 25 %	45 cm x 0,6 cm Elastano 75 % Poliéster 25 %
Tubo para Suprimento de O ₂	2,10 m	2,10 m

INSTRUÇÕES DE USO

Conectar a extremidade da extensão à rede de oxigênio;
Ajuste o fluxo conforme prescrição médica;
Coloque a máscara no rosto do paciente;
Posicione o elástico ao redor da cabeça do paciente;
Conectar a extremidade da extensão à rede de oxigênio;
Ajuste o clipe de metal da máscara;

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

Armazenar em local limpo e seco longe do calor da luz
Temperatura de operação: 18 °C a 40 °C
Temperatura de armazenamento deve estar entre 5 °C a 40 °C
Umidade Relativa do ar < 85%



Máscara De Oxigênio Simples

CONDIÇÕES DE TRANSPORTE

A máscara de oxigênio simples deve ser transportada em embalagem original e nas condições de temperatura entre 5° C a 40° C umidade relativa inferior a 95%.

CONDIÇÕES DE MANIPULAÇÃO

A Máscara deve ser armazenada em local limpo e seco.
Deve ser transportada em embalagem original.

MANUTENÇÃO DE PRODUTO

A Máscara de oxigênio simples não requer manutenção preventiva ou corretiva.
O usuário deve seguir as orientações contidas no manual de instrução para garantir a integridade do produto.
Em caso de dúvidas, mau funcionamento do produto, esclarecimentos, descarte, entre em contato com o importador Cirurgica São Felipe Produtos Para Saúde.

ADVERTÊNCIAS

Não reutilizar a máscara
Não Utilize o produto caso apresente sinais de degradação ou danificação.
Leia com atenção o Manual de instrução, para utilizar corretamente as máscaras.

PRECAUÇÕES

Produto de uso hospitalar
Mantenha o produto em local limpo e seco.
Ao detectar qualquer falha no uso do produto, troque-o por outro
Descarte em local apropriado.

GARANTIA:

A Cirurgica São Felipe, garante ao consumidor deste produto a garantia contra defeitos de fabricação, desde que seja constatado por técnicos da Cirurgica São Felipe, pelo prazo de 365 dias a partir da data da primeira aquisição pelo consumidor, desde que o produto esteja embalado e sem uso, para efeito de garantia deverá constar a nota fiscal deste produto.
A Cirurgica São Felipe considera sem efeito este certificado de garantia caso o produto sofra danos provocados pelo mau uso, armazenamento inadequado e ações da natureza.
Caso a nota fiscal apresente rasuras ou borrões ou a não apresentação da nota fiscal, também será considerada nula a garantia do produto.



Máscara De Oxigênio Simples

Detentor Notificação Anvisa:

Cirurgica São Felipe Produtos Para Saúde Ltda
Rua Graça Aranha, 875 – Vargem Grande – CEP: 83.321-020
Pinhais – PR
CNPJ: 07.626.776/0001-60
AFE: 8.09.011-1 Tel: 41 3354-1001 / 41 3354-1002
Resp. Técnica: Liliam Cristina Aguilár Gomes COREN/PR 358.465
E-mail: sac@cirurgicasaofelipe.com.br
www.cirurgicasaofelipe.com.br
ANVISA Nº: 80901110019

Fabricante:

XIAMEN COMPOWER MEDICAL TECH. CO., LTD
Unit 301 No. 16, Xianghong Road, Xiang`an Torch Industrial Zone,
Xiamen, República Popular da China.
País de Origem: China.