




## Máscara Venturi

### MANUAL DE INSTRUÇÕES MÁSCARA VENTURI

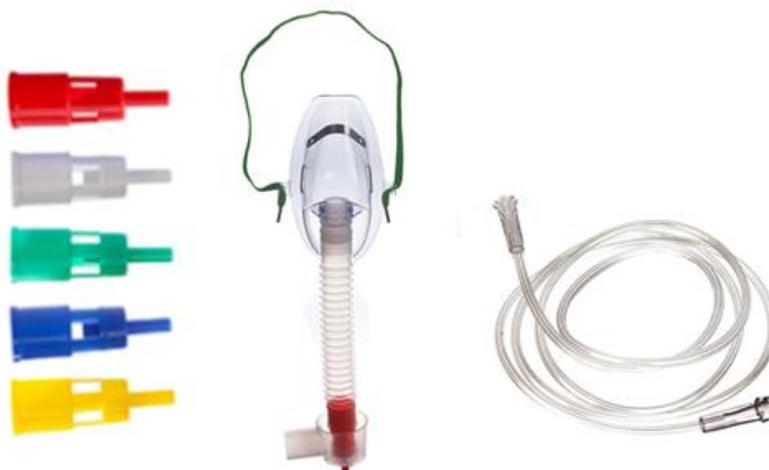



## Máscara Venturi

### INDICAÇÃO DE USO E FINALIDADE

A Máscara Venturi é um dispositivo de alto fluxo cuja o objetivo é manter a saturação de O<sub>2</sub> acima de 90%. Pode ser usado com seis diferentes válvulas de controle de concentração de oxigênio e adaptadores de unidade para fornecer 6 níveis de concentração de oxigênio: 24%, 28%, 31%, 35%, 40% e 50% - cores diferentes.

### PRINCIPIO DE FUNCIONAMENTO

A máscara de Venturi é um sistema de liberação de oxigênio de alto fluxo, que possibilita um controle estrito da Fração inspirada de O<sub>2</sub> fornecida ao paciente crítico em insuficiência respiratória. A codificação da Foi fornecida ao sistema é feita por meio de encaixes plásticos coloridos, sendo a correspondência das cores com a FiO<sub>2</sub> mostrada na figura acima.

### MODO DE USO DO PRODUTO

Escolha o diluidor para a concentração de oxigênio adequada ao paciente (conforme prescrição médica);

Conecte o diluidor selecionado acoplado entre o tubo corrugado (traqueia) e a extensão de oxigênio;

Conecte a outra extremidade da extensão na fonte de oxigênio;

Conecte a outra extremidade do tubo corrugado na máscara;

Defina o fluxo de oxigênio de acordo com o diluidor escolhido;

Passo o elástico fixador pela cabeça do paciente acima das orelhas;

Ajuste a tensão no elástico para fixar a máscara na face do paciente;

Ajuste o clip metálico nasal.

MODELOS:

CP 331501 Máscara Venturi Adulto

CP 331503 Máscara Venturi Pediátrica

### COMPOSIÇÃO:

PARTES	COMPOSIÇÃO
Máscara	PVC
Tubo Corrugado	Polipropileno
Diluidor	Polipropileno
Copo	Polipropileno
Elástico	Fibra de Poliéster e Elastano
Clipe de Metal	Alumínio

### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Código	CP 331501	CP 331503
Tamanhos	Adulto	Pediátrica
Base	106 cm	91,3 cm
Comprimento	137 cm	96,1 cm
Altura	61,7 cm	54,7 cm
Elástico	45 cm* 0.6 cm – Fibra de Poliéster e Elastano	45 cm* 0.6 cm – Fibra de Poliéster e Elastano
Tubo Corrugado	22 F -	22 F
Extensão para Suprimento de O <sub>2</sub>	2,10 m	2,10 m



## Máscara Venturi

Clipe de Metal	64.3 mm*8 mm - Alumínio	64.3 mm*8 mm – Alumínio
Diluidor Azul	Concentração de O <sub>2</sub> 24% / Fluxo de O <sub>2</sub> Sugerido 3 LPM	Concentração de O <sub>2</sub> 24% / Fluxo de O <sub>2</sub> Sugerido 3 LPM
Diluidor Amarelo	Concentração de O <sub>2</sub> 28% / Fluxo de O <sub>2</sub> Sugerido 6 LPM	Concentração de O <sub>2</sub> 28% / Fluxo de O <sub>2</sub> Sugerido 6 LPM
Diluidor Branco	Concentração de O <sub>2</sub> 31% / Fluxo de O <sub>2</sub> Sugerido 8 LPM	Concentração de O <sub>2</sub> 31% / Fluxo de O <sub>2</sub> Sugerido 8 LPM
Diluidor Verde	Concentração de O <sub>2</sub> 35% / Fluxo de O <sub>2</sub> Sugerido 12 LPM	Concentração de O <sub>2</sub> 35% / Fluxo de O <sub>2</sub> Sugerido 12 LPM
Diluidor Vermelho	Concentração de O <sub>2</sub> 40% / Fluxo de O <sub>2</sub> Sugerido 15 LPM	Concentração de O <sub>2</sub> 40% / Fluxo de O <sub>2</sub> Sugerido 15 LPM
Diluidor Laranja	Concentração de O <sub>2</sub> 50% / Fluxo de O <sub>2</sub> Sugerido 15 LPM	Concentração de O <sub>2</sub> 50% / Fluxo de O <sub>2</sub> Sugerido 15 LPM

### MANIPULAÇÃO:

A máscara é de uso em um único paciente e deve ser descartada após o uso.

Uma vez ao dia, limpe a máscara usando detergente neutro e esponja, enxague bem em água corrente, seque com compressas limpas e secas.

Não use detergentes fortes ou com cheiro, desengordurantes, produtos à base de álcool ou sabonetes líquidos.

Descarte e substitua quando ficar suja, descolorida ou rígida.

Descartar a Máscara em local apropriado para resíduos de saúde.

Utilizar EPI's para manipulação;

Desconectar da fonte de oxigênio;

Lavar com água e detergente neutro com auxílio da esponja;

Enxaguar com água corrente;

Secar com compressas limpas e secas;

Colocar em recipiente com ácido Peracético por 15 min, ou Hipoclorito 1% por 30 min; As partes devem ficar totalmente submersos na solução desinfetante.

Lavar em água corrente;

Secar com compressas limpas e secas ou ar comprimido;

Armazenar embalado;

### ADVERTÊNCIAS:

Usar o produto apenas para fornecimento de oxigênio.

Não deve ser utilizado para qualquer outra finalidade diferente da indicação de uso.

Não esterilizar o produto.

Produto não estéril.

### PRECAUÇÕES:

Produto de uso hospitalar

Mantenha o produto em local limpo e seco.

Ao detectar qualquer falha no uso do produto, troque-o por outro.

Descarte em local apropriado.

### GARANTIA:

A Cirúrgica São Felipe, garante ao consumidor deste produto a garantia contra defeitos de fabricação, desde que seja constatado por técnicos da Cirúrgica São Felipe, pelo prazo de 365 dias a partir da data da primeira aquisição pelo consumidor, desde que o produto esteja embalado e sem uso, para efeito de garantia deverá constar a nota fiscal deste produto.

A Cirúrgica São Felipe considera sem efeito este certificado de garantia caso o produto sofra danos provocados pelo mau uso, armazenamento inadequado e ações da natureza.



## Máscara Venturi

Caso a nota fiscal apresente rasuras ou borrões ou a não apresentação da nota fiscal, também será considerada nula a garantia do produto.

### **Detentor Notificação Anvisa:**

Cirurgica São Felipe Produtos Para Saúde Ltda  
Rua Graça Aranha, 875 – Vargem Grande – CEP: 83.321-020  
Pinhais – PR  
CNPJ: 07.626.776/0001-60  
AFE: 8.09.011-1 Tel: 41 3354-1001 / 41 3354-1002  
Resp. Técnica: Liliam Cristina Aguilar Gomes COREN/PR 358.465  
E-mail: [sac@cirurgicasaofelipe.com.br](mailto:sac@cirurgicasaofelipe.com.br)  
[www.cirurgicasaofelipe.com.br](http://www.cirurgicasaofelipe.com.br)  
ANVISA Nº 80901110020

### **Fabricante:**

XIAMEN COMPOWER MEDICAL TECH. CO., LTD  
Unit 301 No. 16, Xianghong Road, Xiang`an Torch Industrial Zone,  
Xiamen, República Popular da China.  
País de Origem: China.